

Masca de protectie respiratorie FFP2 Dr.Albert 10buc/cutie



Pret: 29⁸⁷ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

COMPOZITIA PRODUSULUI

Masca **este formata din material textil netesut, 100% polipropilena.**

Sistemul de fixare este format din banda de burete ajustabila pe forma nasului si snururi elastice.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Produsul **este realizat cu 5 straturi de material netesut si filtrant** pentru a oferi protectie, impiedicand inhalarea prafului sau particulelor prin retinerea aerosolilor solizi si lichizi, asigurand o filtrare eficienta si o respiratie facila.

Este proiectat astfel incat sa asigure o etanseitate adecvata fata de atmosfera ambientala la nivelul fetei purtatorului.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- ❑ Deschideti masca tragand de benzile elastice si asigurati-va ca elementul metalic este in partea superioara a mastii.
- ❑ Pozitionati masca pe barbie si apoi trageti-o peste nas, astfel incat sa va acoperiti complet gura si nasul.
- ❑ Asezati benzile elastice in spatele urechilor.
- ❑ Utilizati ambele maini pentru fixarea mastii: apasati cu degetele mijlocul benzii de fixare din

zona nasului si duceti degetele inspre capetele benzii metalice.

[?] Verificati etanseitatea: acoperiti masca de protectie cu ambele palme, astfel incat sa nu deranjati fixarea mastii pe fata, si expirati puternic, verificand daca aerul iese prin zona nasului. Daca simtiti ca aerul iese prin zona benzii metalice de fixare, asigurati-va ca este suficient de presata.

INSTRUCTIUNI DE INLATURARE

[?] Evitati atingerea celor 2 fete ale mastii, manipularea mastii se va face cu ajutorul snurilor elastice.

[?] Prindeti cele 2 snururi elastice si inlaturati masca de pe fata.

[?] Dupa inlaturarea ei aruncati masca folosita.

[?] Dupa aruncarea mastii spalati-va mainile cu apa si sapun, inainte de a atinge alte suprafete.

ATENTIONARI SI RECOMANDARI

[?] Se recomanda ca masca sa nu fie utilizata mai mult de un schimb sau daca s-a umezit sau deteriorat.

[?] Nu se recomanda utilizarea mastii intr-un mediu cu nivel scazut de oxigen, in timpul somnului sau in atmosfera potential exploziva.

[?] Se recomanda precautie in utilizarea mastii in cazul persoanelor care sufera de astm sau alte afectiuni respiratorii.

Pentru siguranta dumneavoastra va recomandam sa tineti cont de urmatoarele, inainte de utilizarea mastii:

1. Masca se potriveste fizionomiei dvs.
2. Masca nu este deteriorata sau contaminata.
3. Benzile elastice nu sunt deteriorate si au elasticitate.
4. Banda metalica nu este deteriorata sau desprinsa.

INSTRUCTIUNI DE DEPOZITARE

A se proteja de lumina soarelui, umiditate si praf. Se recomanda depozitarea intr-o zona curata si uscata. Pentru depozitare se recomanda respectarea intervalului de temperatura de -20°C si +25°C si umiditate.

Produsul este realizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 425/2016

TERMEN DE VALABILITATE

5 ani

