

Masca medicala faciala, de protectie, de unica folosinta, nesterila, BFE, tip II, 50 buc/set



Pret: 15³⁵ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Masca medicala faciala, de protectie, de unica folosinta, nesterila, BFE, tip II, 50 buc/set

Descriere produs:

Aceasta **masca medicala faciala este fabricata in Romania** si este destinata atat personalului medical, cat si publicului larg.

Sistemul de ajustare din zona nasului este confectionat din metal, pentru a se pozitiona perfect pe fata. Sistemul de prindere este cu fire elastice.

Un procent de 5% din vanzari reprezinta donatia pentru United Way.

Masca medicala este confectionata din 3 straturi:

❓ Stratul alb, din interior, este fabricat din fire netesute de polipropilen si absoarbe umiditatea in timpul utilizarii;

❓ Stratul din mijloc este fabricat dintr-un material filtrant, actionand ca o bariera impotriva virusilor;

❓ Stratul colorat, din exterior, este impermeabil si este tratat cu o substanta speciala, care previne inspiratia microbilor.

Proprietati:

- ☐ Protecție împotriva particulelor de praf;
- ☐ Protecție bacteriană (BFE);
- ☐ Protecție împotriva particulelor inhalate;
- ☐ Protecție împotriva particulelor expirate.

Produsul este clasificat ca fiind **masca medicală de tip II**. Acest tip de clasificare se referă la procentul de filtrare, de minimum 98%.

Mod de folosire:

Purtarea măștii este una dintre măsurile de prevenire și limitare pentru răspândirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinată de noul coronavirus.

Folosirea măștii trebuie combinată cu igiena adecvată a mâinilor și cu alte măsuri de prevenire și control a transmiterii bolilor respiratorii.



Masca se poziționează peste nas și gură, pentru a asigura protecție respiratorie.

Pași în aplicarea corectă a măștii



1
Legați snurul de sus în partea superioară a capului



2
Legați snurul de jos la baza gâtului



3
Fixați partea metalică a măștii cât mai bine pe nas



4
Asigurați-vă ca masca vă acoperă nasul, gura și bărbia, și că este fixa pe față



5
Schimbați masca la fiecare 4 ore sau dacă devine umedă sau defectă

Produsul se folosește o singura data.