

Masca uz medical tip II banda 50buc/cut Dr Albert



Pret: 5⁰⁶ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

COMPOZIȚIA PRODUSULUI

Masca este formată din trei straturi de material textil nețesut, 100% polipropilenă.

Sistemul de fixare este format din banda metalică, ajustabilă pe forma nasului, și snururi/benzi elastice.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Produsul este dispozitiv medical, Clasa I, nesteril.

Stratul interior are rol filtrant.

Materialele textile folosite sunt compatibile cu pielea: nu conțin fibră de sticlă, carbonat de calciu sau citotoxine.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de a intra în contact cu produsul, spălați-vă mâinile cu apă și săpun.

Identificați banda metalică de fixare pe nas și orientați masca astfel încât banda să fie poziționată în partea de sus a măștii.

Poziționați masca pe față, astfel încât marginea pliurilor să fie orientată în jos.

Așezați masca pe față și duceți șnururile elastice după urechi.

Extindeți masca în așa fel încât să acopere gura și bărbia.

După extinderea măștii, apăsați banda metalică din zona nasului pentru a fixa masca.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNLĂTURARE

Evitați atingerea celor 2 fețe ale măștii, manipularea măștii se va face cu ajutorul șnururilor elastice.

Prindeți cele 2 șnururi elastice și înlăturați masca de pe față.

După înlăturarea ei aruncați masca folosită.

După aruncarea măștii, spălați-vă mâinile cu apă și săpun, înainte de a atinge alte suprafețe.

ATENȚIONĂRI ȘI RECOMANDĂRI

Se recomandă ca masca să fie schimbată o dată la 4 ore sau ori de câte ori aceasta s-a umezit sau s-a deteriorat.

Nu se recomandă utilizarea măștii într-un mediu cu nivel scăzut de oxigen sau în timpul somnului.

Se recomandă precauție în utilizarea măștii în cazul persoanelor care suferă de astm sau alte afecțiuni respiratorii

INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE

A se proteja de lumina soarelui, umiditate și praf. Se recomandă depozitarea într-o zonă curată și uscată. Pentru depozitare se recomandă respectarea intervalului de temperatură de -20°C și +25°C și umiditate <80%.

TERMEN DE VALABILITATE

5 ani